


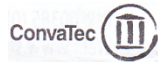

**Повязка на основе Hydrofiber™  
с серебром и укрепляющим волокном**

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**



### **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Аквасель™ Ag Экстра™ повязка Гидрофайбер™ с серебром и усиленным волокном - это мягкая, стерильная повязка, состоящая из 2-х слоев натриевой карбоксиметилцеллюлозы, импрегнированной 1,2% ионным серебром и прошитой усиленным волокном. Серебро, содержащееся в повязке, уничтожает широкий спектр бактерий и обеспечивает антибактериальную среду в ране. Повязка абсорбирует большое количество экссудата, а также бактерий, образует мягкий, когезивный гель, создающий эффект микроконтурирования любой рельефной поверхности раны, поддерживает в ней влажную среду и помогает в удалении нежизнеспособных тканей из раны (процесс аутолитического самоочищения раны). Влажная среда и бактерицидный эффект в ране поддерживают процесс заживления, происходящий в организме, а также уменьшают риск инфицирования раны.

### **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

В соответствии с РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Аквасель Ag Экстра повязка Гидрофайбер с серебром и усиленным волокном может применяться при лечении:

- инфицированных ран или ран с повышенным риском инфицирования.
- ожогов дермальных поверхностных и дермальных глубоких.
- язвенных поражений при синдроме диабетической стопы, артериальных или венозных язв голени, а также язвенных поражений смешанной этиологии; пролежней с частичным и полным повреждением всей глубины тканей (стадии II-IV).
- хирургических ран.
- травматических ран.
- ран, склонных к кровотечениям, например, ран, кровоточащих после

проведения механической или хирургической обработки.

- бластоматозных экссудирующих ран, таких как фунгоидные кожные опухоли, кожные метастазы, саркомы Капоши и ангиосаркомы.

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Аквасель Ag Экстра повязку Гидрофайбер с серебром и усиленным волокном не следует применять у пациентов с повышенной чувствительностью к ее компонентам или у пациентов, у которых в прошлом наблюдалась аллергическая реакция на серебро или натриевую карбоксиметилцеллюлозу.

### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ**

- Стерильность гарантируется, если индивидуальный блистер не был поврежден или был открыт непосредственно перед применением.
- Данное изделие предназначено исключительно для одноразового применения. Повторное использование может привести к увеличению риска возникновения инфекции или перекрестной контаминации, а также к утрате физических свойств изделия, необходимых для его использования по назначению.
- При перевязке ран, имеющих синусы, туннельные ходы или подрывные края, выбирайте Аквасель Ag повязку Гидрофайбер с серебром и усиленным волокном в виде ленты.
- При вскрытии индивидуальной упаковки может ощущаться легкий запах, связанный с процессом стерилизации.
- При нормальном процессе заживления нежизнеспособные ткани удаляются (аутолитическое очищение) из раны, что может приводить к увеличению размеров раны при первых перевязках.
- В случае возникновения трудностей с удалением раневого покрытия следует смачивать его водой или стерильным физиологическим раствором, пока повязку не удастся легко снять. (В случае ожогов дермальных поверхностных и дермальных глубоких см. раздел РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ).
- За счет обеспечения влажной среды в ране, Аквасель Ag Экстра повязка Гидрофайбер с серебром и усиленным волокном способствует образованию новых кровеносных сосудов, которые, будучи нежными, вновь сформированными, в некоторых случаях могут вызвать кровянистое окрашивание раневого отделяемого.
- Аквасель Ag Экстра повязка Гидрофайбер™ с серебром и усиленным волокном не применяется совместно с веществами на вазелиновой (маслянистой) основе.
- Для выбора вторичного раневого покрытия обратитесь к соответствующей части РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
- Надлежащие поддерживающие меры следует принимать соответственно показаниям (например, применение компрессионной терапии при лечении

венозных язв или разгрузка мест давления (уменьшение компрессии) при лечении пролежней, системная антибиотикотерапия, а также частый контроль при лечении инфицированных ран, контроль уровня глюкозы в крови у больных с синдромом диабетической стопы - и т.п.)

- Клиницистам/специалистам в области здравоохранения следует учитывать, что данные о длительном и повторном использовании продуктов, содержащих серебро, очень ограничены, особенно у детей и новорожденных.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Перед наложением повязки следует обработать (очистить) область раны должным образом.
- При наложении Аквасель Ag Экстра повязки Гидрофайбер с серебром и усиленным волокном проследите за тем, чтобы повязка заходила за края крапы не менее чем на 1 см.
- При использовании Аквасель Ag Экстра повязки Гидрофайбер с серебром и усиленным волокном при глубоких ранах, заполняйте рану не более чем на 80%, поскольку, по мере впитывания экссудата, Аквасель Ag Экстра повязка Гидрофайбер с серебром и усиленным волокном увеличивается в объеме, заполняя раневую полость.
- Аквасель Ag Экстра повязка Гидрофайбер™ с серебром и усиленным волокном рекомендуется к применению с:
  - Задерживающими влагу покровными повязками, например, Версива XC (Versiva™ XC™), Дуодерм супертонкий (DuoDERM™ Extra Thin), Грануфлекс супертонкий (Granuflex™ Extra Thin) или Карбофлекс (CarboFlex™),
  - неадгезивными покровными повязками Versiva™ XC NA или CarboFlex или же с текстильными или иными покровными повязками в случае обильно экссудующих ран;
  - при лечении сухих ран - см. ниже раздел ДЛЯ СУХИХ РАН.
- Смотрите подробные инструкции по применению покровных (вторичных) повязок в инструкциях-вкладышах к ним.
- Каждую рану следует регулярно контролировать. Аквасель Ag Экстра повязку Гидрофайбер с серебром и усиленным волокном следует удалить, если существуют клинические показания (например, в случае ее протекания, чрезмерного кровотечения, усиление болей в ране) или максимум через 7 дней.



Повторно не использовать

STERILE R

Стерилизовано гамма-облучением

REF

Артикул



Хранить в сухом месте



Хранить при комнатной температуре



Перед использованием прочитайте инструкцию по применению

LOT

Номер партии



Использовать до



Не использовать, если упаковка повреждена.

