


Ureter-Dauerschienen »HYDROPUR®«

Ureteral Stent
»HYDROPUR®«

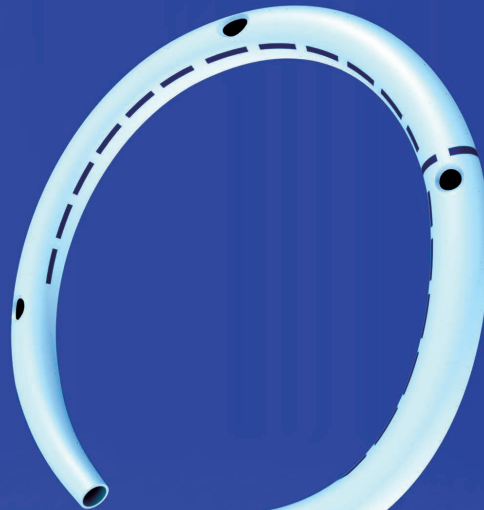

UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE

EDITORIAL



Die Ureter-Dauerschiene »HYDROPUR®« überzeugt durch ihre extreme Gleitfähigkeit, die Beständigkeit während ihrer Verweilzeit und das einfache Handling. Die Schienen sind in fein abgestuften Größen erhältlich sowie als steuerbare Ausführung oder mit Pusher und Applikationsfaden.

Die Materialfestigkeit in Verbindung mit kleinen, tangential versetzten, atraumatischen Drainage-Augen ermöglicht eine komplikationsfreie Applikation. Die konisch angeformte Spitze des Nierenpigtails ermöglicht ein sehr gutes Vorschieben der Ureter-Dauerschiene.

Unser Material

Aus gutem Grund haben wir uns bei der UROMED Ureter-Dauerschiene »HYDROPUR®« für aromatisches Polyurethan entschieden. Es erfüllt die hohen Anforderungen hinsichtlich Flexibilität, Zugfestigkeit und Formstabilität sowie gute Memory-Eigenschaften in idealer Weise. Eine Abrundung dieser Merkmale erfolgt durch die spezielle Fertigungstechnik und Vergütung der Oberfläche, die sich in einer sehr guten Gleitfähigkeit und geringer Inkrustationsneigung widerspiegeln.

Daher ist die UROMED Ureter-Dauerschiene »HYDROPUR®« für die Langzeitdrainage geeignet, wobei die individuelle Inkrustationsneigung des Patienten zu berücksichtigen ist.

Our Ureteral Stent »HYDROPUR®« convinces by its high gliding ability, stability during the indwelling time and easy handling. The stents are available in finely graduated sizes as well as manoeuvrable versions or with pusher and application thread.

The rigidity of material in combination with small, tangentially placed, atraumatic eyes enables a complication-free placement. The dilating tip of the pigtail provides a good advancement of the stent.

Our Material

With good reasons we have decided on aromatic polyurethane for the UROMED Ureteral Stent »HYDROPUR®«. This material ideally fulfills the high demands concerning flexibility, tensile strength, form stability and good memory effect. Additional to these features are the special manufacturing procedure and the refined surface which are reflected in an excellent ability of gliding and low incrustation rates.

Therefore the UROMED Ureteral Stent »HYDROPUR®« is suitable for long-term drainage but the individual incrustation rate of the patient has to be taken into consideration.

UROMED »HYDROPUR®« SELDINGER-TECHNIK

UROMED »HYDROPUR®« SELDINGER-TECHNIQUE

REF 4445 – 4449

Zentral offene Spitze
mit Perforation im Ureterteil

*Open tip with perforation
in the ureteral part*

Katheter zur inneren
Schiengung des Ureters

- Set zur Applikation in Seldinger-Technik
- aromatisches Polyurethan
- mit vergüteter Oberfläche
- geringe Inkrustationsneigung
- zur Langzeitanwendung geeignet
- gutes Vorschiebeverhalten durch mittlere Materialkonsistenz
- konische, dilatierende Spitze
- kleine, kreisrunde Pigtails
- atraumatische Augen
- röntgenologisch darstellbar
- mit monofilem Applikationsfaden
- graduiert

*Catheter for the internal stenting
of the ureter*

- *set for application in Seldinger-technique*
- *aromatic polyurethane*
- *with refined surface*
- *low incrustation rate*
- *suitable for long-term application*
- *good advancement control because of medium material consistency*
- *conical, dilating tip*
- *small-sized, circular pigtails*
- *atraumatic eyes*
- *overall radiopaque*
- *with monofilament application thread*
- *graduated*

Ureter-Dauerschleife
beidseitiger Pigtail
*ureteral stent, double pigtail
central open tip, with
perforation in the ureteral part*

Nachschiebeschlauch
Länge 45 cm bzw. 70 cm bei Ch. 4,8
*pusher
length 45 cm and 70 cm for Ch. 4,8*

Diese UROMED »HYDROPUR®« Dauerschleife können Sie mit einem Führungsdraht Ihrer Wahl einsetzen: für Dauerschleifen in Ch. 4,8 – Führungsdraht in 0,028", für Dauerschleifen in Ch. 6-9 – Führungsdraht in 0,035".

This UROMED »HYDROPUR®« can be used with a guidewire of your choice: for stents Ch. 4,8 – guidewire 0,028", for stents Ch. 6-9 – guidewire 0,035".

Unmittelbar nach Positionierung der Ureter-Dauerschleife ist der Applikationsfaden zu entfernen.

Right after positioning of the ureteral stent the application thread has to be removed.

REF REF	Dauerschleife Stent	PZN PZN
4445-24	Ch. 4,8 / 24 cm	11371225
4445-26	Ch. 4,8 / 26 cm	11371231
4445-28	Ch. 4,8 / 28 cm	11371248
4446-24	Ch. 6,0 / 24 cm	11371254
4446-26	Ch. 6,0 / 26 cm	11371260
4446-28	Ch. 6,0 / 28 cm	11371277
4446-30	Ch. 6,0 / 30 cm	11371283

REF REF	Dauerschleife Stent	PZN PZN
4447-24	Ch. 7,0 / 24 cm	11371308
4447-26	Ch. 7,0 / 26 cm	11371314
4447-28	Ch. 7,0 / 28 cm	11371320
4447-30	Ch. 7,0 / 30 cm	11371337
4448-26	Ch. 8,0 / 26 cm	11371343
4448-28	Ch. 8,0 / 28 cm	11371372
4448-30	Ch. 8,0 / 30 cm	11371389
4449-26	Ch. 9,0 / 26 cm	11371395
4449-28	Ch. 9,0 / 28 cm	11371426
4449-30	Ch. 9,0 / 30 cm	11371432

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED Kurt Drews KG
Meessen 7/11
D-22113 Oststeinbek

Telefon	Zentrale	+49 (0) 40 / 7 13 007- 0
	Kliniken	+49 (0) 40 / 7 13 007- 11
	Praxen	+49 (0) 40 / 7 13 007- 21
	Apotheken/Handel	+49 (0) 40 / 7 13 007- 31

Telefax		+49 (0) 40 / 7 13 007- 99
----------------	--	----------------------------------

Internet		www.uromed.de
-----------------	--	---

E-Mail		service@uromed.de
---------------	--	---

Die Angaben entsprechen unserem
Kenntnisstand bei Drucklegung.
Produktänderungen aufgrund technischen
Fortschrittes vorbehalten.

*All indications correspond to our know-
ledge at the date of press.
Due to technical progress all products are
subject to change.*

Material-Nr. 0025 · Rev. 2 · 06/2020

© UROMED Kurt Drews KG

UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE